


Kratka navodila

Enostavna namestitev senzorja Syai

123

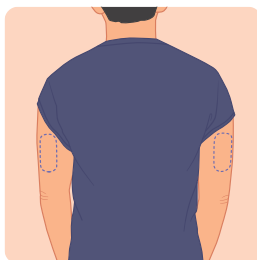


Izbira mesta namestitve senzorja

Na nadlakti izberite mesto za namestitev.
Izberite mesto brez brazgotin, madežev, zatrdlin ali tetovaž.
Izogibajte se razdraženim mestom in mestu na katerem ste imeli nameščen predhodni senzor.




Priprava mesta namestitve senzorja

Mesto za namestitev očistite in posušite.
Kožo očistite z vodo in milom in/ali alkoholno blazinico.
Pred namestitvijo senzorja mora biti koža suha.

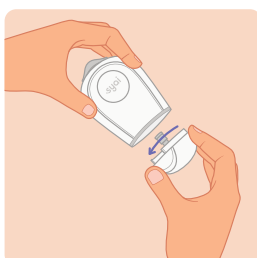

1

Zavrtite spodnji pokrov aplikatorja in ga odprite.
Ne nameščajte senzorja, če opazite, da je aplikator poškodovan ali že odprt.

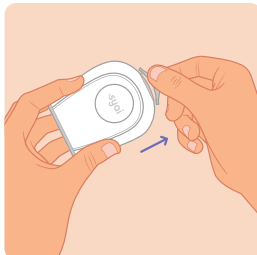

2

Odstranite varovalo na vrhu aplikatorja.
Gumba pod varovalom se še ne dotikajte, da preprečite nenamerno sprožitev senzorja.



3

Aplikator položite plosko na mesto za namestitev, pritisnite sivi gumb za sprožitev na vrhu aplikatorja in nežno odstranite aplikator.
Senzor mora biti sedaj pritrjen na kožo.



Po namestitvi sledite navodilom v aplikaciji

Prepričajte se, da je senzor dobro nameščen in nežno pritisnite trak okoli senzorja ob kožo za še boljše pričvrstitev.
Nato sledite navodilom na zaslonu vašega pametnega telefona v aplikaciji Syai Tag.

Syai Tag App



0344

Center za pomoč uporabnikom

T: 059 057 510

E: info@mojCuker.si

S: www.mojCuker.si



Distributer za Slovenijo: VI vis d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica